

Personliga inställningar av ditt Mobius X8

Alla ben har olika former och storlekar och många människor har olika storlek på ben. Mobius X8 är anpassningsbara för att passa olika benstorlekar och former.

Mobius X8 har två olika valfria tjocklekar sidokuddar så att skyddet ska ligga så tätt som möjligt mot knäets sidor.

Om du passar ett S eller M skydd enligt mått, men ditt underben är för stort för skyddet, kan du byta ut skalkuddarna med tunnare dynor från Medium eller Large Pad Fit Kit samt att du kan byta ut de nedre remmarna med större remmar från ett medium eller Large rem-kit. Samma sak kan göras för överbenet.

STORLEKSGUIDE

Mät från knäskålens mittpunkt till 6 tum (15,24cm) uppåt på låret. Mät lårets omkrets vid den punkten. Följ mätningstabellen nedan med denna mätning.

VARNING:

- Om du faller mellan två storlekar väljer du den mindre storleken.
- Om # 2 plattan i knäskålen kommer i kontakt med knäskyddsskalen och inte dras åt tillräckligt, är skyddet för stort för dig. Att använda en X8 som är för stor för dig fungerar som den är designad för och skyddar dig inte ordentligt. Det kan också orsaka för tidigt slitage på produkten och kan upphäva garantin.

LÅR OMKRETS

XS: 38 - 43cm

S: 43 - 48cm

M: 48 - 53cm

L: 53 - 58cm

XL: 58 - 63cm

KNÄ BREDD

8.1 - 9.6cm

8,6 - 11,2cm

8,6 - 11,2cm

8,6 - 11,2cm

10,7 - 12, cm

